

Instructie monstername Hygiënecheck Kalf

Let op: haal het koelement meteen na ontvangst van het pakket uit de doos en bewaar deze in de vriezer. Zorg dat u het koelement zo plat mogelijk invriest. Verstuur de monsters bij voorkeur aan het begin van de week naar GD.


Vorbereiding

Haal alle materialen uit de doos en leg ze op een schone plek. Vul het inzendformulier zo volledig mogelijk in. Op de achterzijde (onder Bacteriën → overig) kunt u de drie onderzoeken aanvinken. Vul in de kolom 'Monsternummer' telkens het nummer of de omschrijving in die u ook noteert op het etiketje op het Rodac-plaatje of het buisje. Het nemen van de monsters neemt gemiddeld 20 minuten in beslag.

Monstername kalverbox of iglo

Neem een monster uit de kalverbox of iglo die u voor het eerstvolgende kalf dat geboren wordt gaat gebruiken. De uitslag geeft inzicht in het aantal bacteriën dat na reiniging in het kalverhok is achtergebleven. Open het Rodac-plaatje pas als u het monster gaat nemen en raak de gele gel niet aan. U hoeft voor dit onderzoek geen handschoenen te dragen.


1. Noteer uw UBN én het nummer van de kalverbox of iglo op het etiket op het Rodac-plaatje. Het nummer van de de kalverbox of iglo gebruikt u ook als identificatie op het inzendformulier.
2. Kies een plek op de zijwand, dichtbij de drinkemmer (op neushoogte, ongeveer een onderarm lengte vanaf de onderkant) zonder stof- en stroresten. Raak deze plek niet aan met uw handen.
3. Draai het deksel van het Rodac-plaatje open.
4. Druk de gele kant van het Rodac-plaatje, zonder te schuiven of te draaien, één seconde licht op het oppervlak van de wand van de kalverbox.
5. Doe het deksel terug op het Rodac-plaatje en draai met een klik vast. Bewaar het monster tot verzending gekoeld.

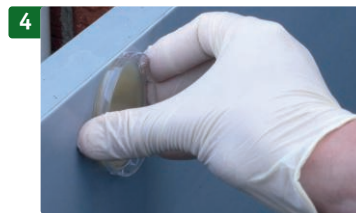

Monstername schoongemaakte melkverstrekker (biestfles, sonde of speenemmer)

Neem een monster van de schoongemaakte melkverstrekker die u wilt gaan gebruiken voor het geven van biest of melk. Door bepaling van het kiemgetal van de melkverstrekker weet u hoe schoon deze is. Raak de speen en binnenkant van de fles/sonde of (speen)emmer niet aan met de blote handen.

1. Zet de materialen klaar:
 - 2 schone glazen gevuld met kraanwater
 - de melkverstrekker (fles/sonde of (speen)emmer) die u voor het eerstvolgende kalf dat geboren wordt gaat gebruiken
 - bijgevoegde buis 50 ml (met etiketje 'Monstername biestverstrekker' op de buis)
2. Noteer uw UBN + het type melkverstrekker op de sticker op de buis met de sticker 'Biestverstrekker'.
3. Noteer het type melkverstrekker ook onder 'Monsternummer' op het inzendformulier.
4. Leeg de twee glazen kraanwater in de gekozen melkverstrekker. Zwenk de melkverstrekker een aantal keer heen en weer.

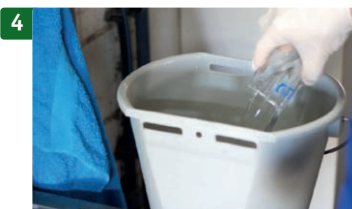


5. Trek nu de wegwerphandschoenen aan.
6. Vul de 50 ml-buis tot aan de rand. Knijp hiervoor met de hand de vloeistof uit de speen of de sonde. Gebruikt u geen speenemmer, vul dan het monsterbuisje door de vloeistof voorzichtig rechtstreeks uit de emmer te gieten.
7. Draai het deksel op het monsterbuisje en bewaar het monster tot verzending gekoeld.



Monstername biest

Door de biest te controleren op het kiemgetal krijgt u een indruk hoe schoon de biest is die u aan het kalf verstrekt. Vang de biest op zoals u dat gewoonlijk doet en bewaar deze op de gebruikelijke manier. Neem het monster vervolgens pas vlak voor u de biest aan het kalf geeft, zodat u een beeld heeft van de biest zoals het kalf het krijgt.

1. Zet de materialen klaar:
 - emmer waarin u de biest bewaart
 - wegwerppipet (raak de opening aan het uiteinde niet aan)
 - bijgevoegde buis 50 ml (met etiketje 'Monstername biest' op de buis)
2. Noteer uw UBN op het etiketje op de buis.
3. Noteer 'Biest' onder 'Monsternummer' op het inzendformulier.
4. Neem een monster biest met de wegwerppipet (1 milliliter) uit de emmer.
5. Knijp de inhoud van de wegwerppipet leeg in het monsterbuisje.
6. Vul voorzichtig aan tot 50 milliliter met kraanwater (zie maatstreepjes op het monsterpotje).
7. Draai het deksel op het monsterbuisje en bewaar het monster tot verzending gekoeld.

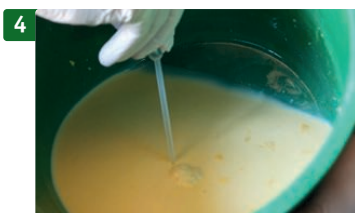

Inpakken en verzenden

1. Doe het Rodac-plaatje in een van de bijgeleverde sealbags (plastic zak) en plak deze dicht met de daarvoor bestemde plakstrip.
2. Doe de monsterbuisjes elk ook in een aparte sealbag. Voeg aan beide zakjes een absorptievel toe en plak ze daarna dicht.
3. Stop het ingevulde inzendformulier, de drie monsters en het ingevroren koelement in de bubbeltjesenvelop.
4. Stuur het geheel dezelfde dag nog naar GD, per post of via uw dierenartsenpraktijk. Bij dagtemperaturen boven de 15 graden is het advies de monsters gekoeld via uw dierenartsenpraktijk in te sturen.
5. Binnen 10 werkdagen heeft u de uitslag in huis.

Scan de QR-code en bekijk een video over de Hygiënecheck Kalf en de monstername:



Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl/hygienecheck