

# X6 Reader schapen en geiten



GD LOOPT VOOROP IN DIERGEZONDHEID  
MET INNOVATIEVE PRODUCTEN EN DIENSTEN



#### Lenen van de reader

De X6 reader is geheel kosteloos te lenen. Hiermee wil GD het digitaal inschrijven van monsters gemakkelijker maken en stimuleren. Neem bij interesse contact op met GD via 088 20 25 500, optie 3. Wanneer u voor het eerst gebruik maakt van de reader, vraag dan naar de mogelijkheden voor assistentie door een GD-medewerker.

**Speciaal voor schapen en geiten heeft GD de X6 reader waarmee u monsters eenvoudig digitaal kunt inschrijven. Dit kunt u direct vanuit de stal doen. De ingebouwde RFID-scanner registreert de oornummers van de dieren. Daarnaast worden barcodes op de monsternamebuizen herkend met behulp van de ingebouwde camera.**

#### Inschrijven via de app

Voor het inschrijven van monsters met de X6 reader is een speciale app ontwikkeld. Deze app is te vinden op het beginscherm van de reader. Voordelen hiervan zijn:

- U hoeft niet in te loggen op VeeOnline.
- De app werkt eenvoudig en doelgericht: niet meer scrollen over pagina's en alleen relevante knoppen en onderzoeken worden weergegeven.
- Doordat de app offline werkt, kunnen monsters snel achter elkaar ingeschreven worden.

## Handleiding reader


Kijk op [www.gddiergezondheid.nl/readerdi](http://www.gddiergezondheid.nl/readerdi) voor een uitgebreide handleiding en voor handige tips! In het kort:

- Laad de reader op met bijgeleverde oplader. Zet de reader aan en wacht minimaal twee minuten voordat u de 'GD Monster' app opent (i.v.m. het activeren van de RFID scanner).
- Vul in het beginscherm het UBN, de DAP en de monstergegevens in.
- Met de knop 'monster toevoegen' start u de inschrijving.
- Houd de reader dicht bij het oornummer; deze wordt automatisch gescand.
- Met de knop aan de linkerzijde van de reader activeert u de camera om de barcode op de buis te registreren.
- Vink de gewenste onderzoeken aan en kies eventueel 'selectie overnemen'.
- U ziet direct in het monsternamescherm het aantal monsters per bepaling dat u al heeft ingeschreven.
- In het overzichtsscherm ziet u een lijst van alle monsters, welke u indien gewenst nog kunt wijzigen.



Meer informatie:

[www.gddiergezondheid.nl/readerdi](http://www.gddiergezondheid.nl/readerdi)

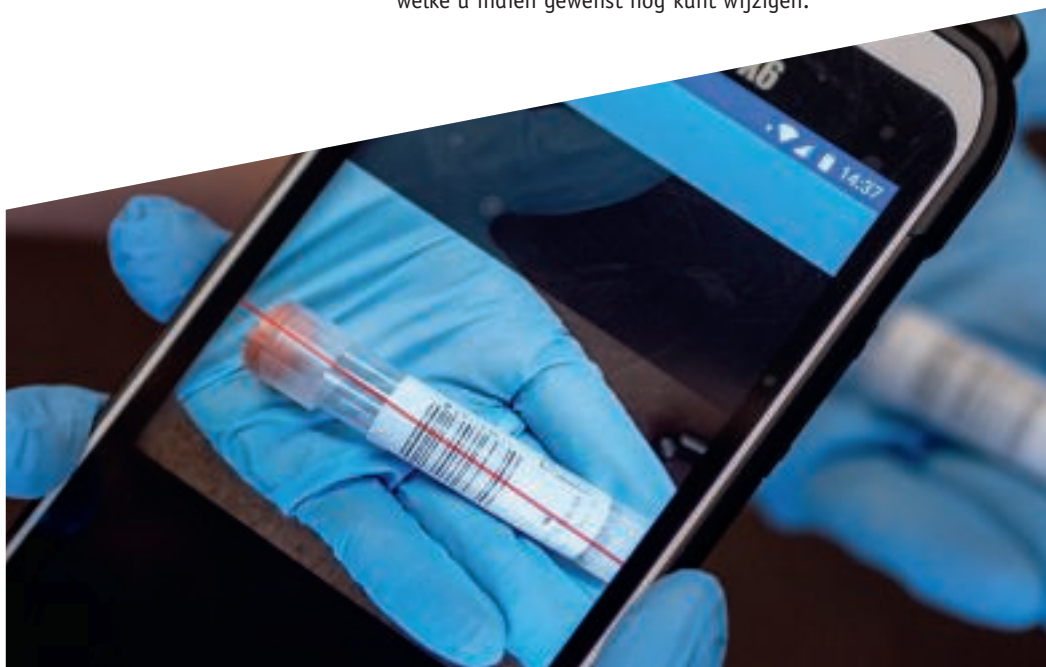



## Meer informatie

Wilt u ook kosteloos gebruik maken van de reader? Dan kunt u bellen naar 088 20 25 500, optie 3. Kijk voor meer informatie op [www.gddiergezondheid.nl/readerdi](http://www.gddiergezondheid.nl/readerdi).

## Mogelijke materiaalsoorten en onderzoeken

Met de X6 reader kunt u drie soorten materiaal inschrijven: serum, EDTA en melk. Dit is op voorwaarde dat de buizen zijn voorzien van een barcode, dus ook de melkbuisen. Onderstaande tabel geeft aan welke onderzoeken ingeschreven kunnen worden met de reader:

Materiaal	Onderzoek schaaap	Onderzoek geit
Melk	Zwoegerziekte antistoffen ELISA	CAE antistoffen ELISA
	CL, zwoegerziekte, paratbc, chlamydia ELISA	CL, CAE, paratbc, chlamydia ELISA
	Paratuberculose antistoffen ELISA	Paratuberculose antistoffen ELISA
Serum	Zwoegerziekte antistoffen ELISA	CAE antistoffen ELISA
	CL, zwoegerziekte, paratbc, chlamydia ELISA	CL, CAE, paratbc, chlamydia ELISA
	CL antistoffen ELISA	CL antistoffen ELISA
EDTA	Scrapie genotypering PCR	Scrapie genotypering PCR



Meer informatie vindt u op:

[www.gddiergezondheid.nl/readerdi](http://www.gddiergezondheid.nl/readerdi)