

Handleiding reader schaap geit

Met de reader schaap geit schrijft u eenvoudig monsters van schapen en geiten digitaal in.

Hoe werkt het

De X6-reader kunt u direct in de stal gebruiken om eenvoudig uw monsters digitaal in te schrijven. Dankzij de ingebouwde RFID-scanner, worden oornummers snel geregistreerd. Daarnaast worden barcodes op de monsternamebuizen herkend met behulp van de ingebouwde camera.



Monsters inschrijven in 4 stappen

1. Opstarten

- Laadt de reader op met de meegeleverde oplader.
- Zet de reader aan door de 'aan-/uitknop' kort ingedrukt te houden. Ontgrendel het scherm door omhoog te vegen. Met de 'aan-/uitknop' kunt u de reader ook vergrendelen (1x indrukken) of uitzetten (kort ingedrukt houden).
- *LET OP:* Wacht na het opstarten van de reader minimaal twee minuten voordat u de 'GD Monster' app opent (i.v.m. het activeren van de RFID scanner).
- De app is te herkennen aan het GD logo en bevindt zich op het startscherm en in de app-lijst.

2. Beginscherm

- Vul rechtsboven bij 'DAP' éénmalig het DAP nummer en het bijbehorende GD-relatienummer in. Dit blijft vervolgens automatisch opgeslagen.
LET OP: Een correct ingevoerd relatienummer is essentieel om de inschrijving te verwerken¹
- Vul daarna het UBN, de diersoort (schaap of geit) en het materiaal (Melk, Serum, EDTA) in.²
U kunt deze gegevens hierna niet meer wijzigen.
- Gebruik de knop 'MONSTER TOEVOEGEN' om de inschrijving te beginnen.

3. Monster toevoegen

- Scan het oormerk automatisch door de bovenzijde van de reader dicht bij het oormerk te houden. U hoeft hiervoor geen knop in te drukken. Het nummer wordt vervolgens automatisch in het vakje 'Diernummer' ingevuld.
- De RFID scanner staat aan wanneer het icoontje achter 'Diernummer' rood is. Is het icoontje zwart? Tik dan met uw vinger op het icoontje of druk de F1 knop in.³
- Met de knop aan de linkerkant van de reader kunt u de barcode-camera aanzetten. Houd hiervoor de barcode van de buis op de rode lijn. Zodra de reader heeft scherpgesteld op de barcode, wordt deze in het balkje 'Buisnummer' ingevuld.⁴
- U hoeft geen vaste volgorde aan te houden met scannen. U kunt zowel beginnen met het oormerk, als met de barcode op de buis.
- Selecteer het gewenste onderzoek en neem indien gewenst de selectie over naar het volgende monster. Het kader geeft aan hoe vaak u een monster voor het betreffende onderzoek heeft ingeschreven.

4



4. Overzicht & afronden

- Dit scherm geeft een overzicht van de inzending.
- Druk op het potlood-icoontje om een monster te wijzigen of te annuleren.
- Met de knop 'VOLGEND MONSTER TOEVOEGEN' kunt u verdergaan met de inschrijving.
- Indien u klaar bent, drukt u op 'VERZENDEN'. Nadat u op 'AKKOORD' drukt wordt de inschrijving verzonden naar GD. Hiervoor maakt de reader gebruik van het 4G netwerk.
- Verstuur vervolgens de monsters naar GD. Hier hoeft geen inzendformulier bij.
Tip: voeg wel een notitie toe waarop DAP nummer en UBN staan.

Handige tips!

- ¹ Bij het uitlenen van de reader aan een DAP, zal GD voor u het relatienummer invullen. Moet u het toch zelf invullen? Dan kunt u het relatienummer bij GD opvragen.
- ² De app controleert automatisch of het UBN geldig is. U kunt pas drukken op 'MONSTER TOEVOEGEN' wanneer alles is ingevuld.
- ³ Scant de RFID het eerste dier niet? Dan heeft u wellicht de app al gestart voordat de RFID gereed was. Sluit de app volledig af en open deze opnieuw.
- ⁴ Voor het registreren van de barcode moet de camera hierop scherpstellen. Dit werkt het beste met een effen-gekleurde achtergrond. U kunt bijvoorbeeld de buis in uw hand leggen tijdens het scannen en uw handschoen als effen-achtergrond gebruiken, zie foto.



Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl