

Inpakinstructie monsters slachtlijn rund

1



Vul de buisjes aan de slachtlijn voor max 3/4. Spoel een vies buisje af en zorg dat duidelijk is bij welk rund dit buisje hoort met behulp van een sticker of watervaste stift.

2



Bewaar de afgenomen bloedmonsters in de koelkast.

3



Op www.reactir.nl kunt u de getapte monsters koppelen aan het betreffende rund en verzenden aan GD.

4



Verpak de bloedbuizen in absorptiemateriaal.

5



Doe de bloedbuizen met absorptiemateriaal in een vloeistofdichte sealbag en plak hierop een afzendersticker met uw gegevens.

6



Schuif de sealbag in een bubbeltjesenvelop en voorzie de envelop van een adressticker.

Verpakkingsmaterialen bestelt u eenvoudig via www.gdwebshop.nl of scan onderstaande QR-code



U kunt bij vragen contact met ons opnemen via slachtlijn@gddiergezondheid.nl.